

パティ・バディーズ 耳栓

水や騒音から耳をしっかりガード!!

新素材〈FLO-TEK™〉シリコン使用

新素材〈FLO-TEK™〉シリコンは密閉性が高く、長時間装着しても不快感がありません。また、好みのサイズにちぎって使用できます。きれいな手で触るようにし、濡れた場合はタオルで軽くたたいて、乾燥させてからケースに収めると、長期間使用することができます。また、水に浮き、鮮やかな色をしていますので、万一水中に落としてもすぐに見つけることができます。

中・外耳炎やサーファーズ・イヤアの予防に最適


中耳炎患者の為に発明され、水を完全にシャットアウトします。スタイリッシュで実用的なアイテムとして、特に水泳選手やサーファーなどに注目されています。

装着方法によって遮音性を調整可能

浅く押し込めば外部からの音が聞こえ、少し深めに押し込めば遮音性が高まります。水泳授業も十分に聴きとれます。

⚠ 注意

- ♪ 不衛生と感じたり、粘りが無くなった時は、交換してください。
- ♪ 正しく装着されなかった場合、効果は低減します。
- ♪ 耳の奥まで入れないでください。外れない時は、無理に外さず、専門医にご相談ください。
- ♪ 炎症、かぶれ、かゆみ、はれ、刺激を感じた時は使用を中止し、専門医にご相談ください。
- ♪ 水深3メートル以上の潜水や飛び込みには使用しないでください。
- ♪ 人体に無害な素材ですが、窒息の可能性がありますので、口にいけないでください。目的以外のご使用はお避けください。
- ♪ 小児の手が届かないところに保管してください。また、子供が使用する際は、大人の監督のもとで行ってください。
- ♪ 脱着を急激に行うと気圧の変化で鼓膜を傷めることがあります。

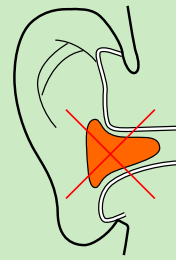

使用方法



①一粒をもみます



②丸めます



③押し当てます



④平らに広げます



⑤耳穴を塞ぎます



耳の後ろから押しあげて外します



耳栓について述べた学術論文をご紹介します。

www.entry-japan.com

(株) エントリージャパン

Tel. 03-3406-6838

U.S.A.製

